



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО
YAMAGUCHI ORION

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
USER GUIDE

YAMAGUCHI
YAMAGUCHI ELECTRONICS
SOLUTIONS, CO. LTD.

Japan



Ознакомиться с продукцией
компании Yamaguchi можно на
сайте www.yamaguchi.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	4
Ключевые особенности.....	6
Комплект поставки.....	6
Описание деталей кресла.....	7
Зоны массажного воздействия.....	7
Установка кресла.....	8
Сборка кресла.....	9
Перемещение кресла.....	11
Пульт управления.....	12
Описание режимов работы.....	14
I. Автоматический режим.....	14
II. Ручной режим.....	17
III. Воздушно-компрессионный режим.....	18
IV. Режим прогрева.....	19
V. Режим роликового массажа стоп.....	19
VI. Настройки.....	20
Режим Bluetooth.....	22
Уход и хранение.....	24
Технические характеристики.....	25
Устранение неполадок.....	26



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4

- Сохранность и эффективное использование массажного кресла возможны только в случае его правильной сборки, установки и применения исключительно по назначению.
- Перед первым использованием осмотрите кресло и убедитесь в отсутствии повреждений.
- До начала массажа проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет использовать массажное кресло. Во время массажа следите за своим самочувствием.
- Устанавливайте массажное кресло на твердой, ровной поверхности.
- При перемещении кресла из холода в теплое помещение подождите минимум час, прежде чем начать его использование. Перепад температур может привести к повреждению устройства.
- Не используйте массажное кресло при температуре выше 40°C.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться креслом без присмотра со стороны.
- Не используйте массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи работающего изделия.
- Не используйте кресло вблизи раскаленных предметов и избегайте попадания на кресло прямых солнечных лучей.
- Для массажа используйте удобную одежду, не стесняющую движений.
- Не пытайтесь проводить массаж головы или суставов.
- Располагайтесь в кресле только лицом вверх, не пытайтесь массировать живот или передние поверхности бедер.
- Не помещайте руки или ноги между роликами, иначе это может привести к травме.
- Во время использования кресла не держите в кармане сотовый телефон, а также острые и режущие предметы во избежание повреждений.
- Обязательно отключайте устройство от сети после использования.
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа, немедленно прекратите использование кресла и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Массажное кресло не предназначено для терапевтических или лечебных целей.
- Не вставайте, не садитесь и не помещайте тяжелые предметы на подставку для ног.
- Не вставайте ногами на подлокотники, сиденье или спинку кресла.
- Не засыпайте во время сеанса массажа.
- Не просовывайте посторонние предметы в складки или зазоры массажного кресла.
- Прежде чем изменять угол наклона подставки для ног или спинки кресла, убедитесь что рядом с ними отсутствуют какие-либо посторонние предметы, домашние животные или люди (особенно дети).

- Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные компанией-производителем.
 - Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
 - Не тяните массажное кресло за шнур питания.
 - Не массируйте опухшие или воспаленные участки тела.
 - Не используйте массажное кресло дольше, чем 30 минут за один сеанс. Ограничьте время массажа любой конкретной зоны 10 минутами. Чрезмерное превышение времени использования массажного кресла, особенно в коммерческих целях, может вызвать перегрев массажных механизмов и сократить срок его службы.
 - Проверьте соответствие напряжения домашней сети требованиям к эксплуатации кресла.
 - Убедитесь, что массажное кресло подключено к соответствующей и надлежащим образом заземленной розетке.
 - Убедитесь, что штепсельная вилка надежно и полностью вставлена в розетку во избежание короткого замыкания и пожара.
 - Ни в коем случае не используйте кресло при видимых повреждениях шнура или вилки!
 - Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, запутан, не перегибался и не был натянут во избежание повреждения или возгорания.
 - Запрещено касаться шнура или вилки влажными руками!
 - Если во время использования массажного кресла произошло отключение электропитания, переведите переключатель питания в положение «0» (выкл.) и отключите кресло от сети во избежание повреждений до тех пор, пока подача электричества не будет восстановлена.
 - При возникновении какого-либо отключения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, шума и т. д.) немедленно прекратите его использование!
 - Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления, это касается также цвета и комплектующих изделия.
- Использование массажного кресла противопоказано:**
- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
 - при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
 - больным, проходящим курс медицинского лечения;
 - лицам, которые испытывают недомогание без установленного диагноза;
 - при заболеваниях остеопорозом;
 - лицам с повышенной температурой тела (37,5 градусов Цельсия и более);
 - при тромбофлебите;
 - при острых заболеваниях;
 - при высоком давлении;
 - при сердечно-сосудистых заболеваниях;
 - при противопоказанном мануальном массаже;
 - при наличии опухолей;
 - во время беременности и менструации;
 - при повреждениях внутренних органов;
 - детям до 12 лет в период формирования костно-мышечной системы.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

6

- 24 автоматических режима массажа.
- Дополнительный режим Демо.
- Инновационная функция качания кресла **Wave Pro**.
- Уникальный четырехроликовый массажный механизм охватывает не только всю поверхность спины, но и воздействует на область ягодиц.
- Возможность прослушивания Ваших любимых мелодий через встроенные динамики с помощью беспроводной системы Bluetooth.
- Уникальная беспроводная система управления креслом с помощью Вашего телефона или планшета с операционной системой Android или iOS.
- Инновационный роликовый массаж подошвы ступней.
- Русифицированное меню пульта управления.
- Система нулевой гравитации ZERO-G изменяет угол наклона кресла, переводя Ваше тело в положение, при котором вы перестаете ощущать силу земного притяжения и словно оказываетесь в невесомости.
- Опциональный прогрев спины и поясницы.
- Возможность выбора длительности массажа: 10/20/30 минут.
- Воздушно-компрессионный массаж рук, плеч, спины, поясницы, ягодиц, икр и ступней.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кресло x 1
- Пульт управления x 1
- Шнур питания x 1
- Руководство пользователя x 1
- Транспортная коробка x 1


Примечание. Комплект поставки может несколько отличаться от указанного в данном руководстве.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРЕСЛА

7

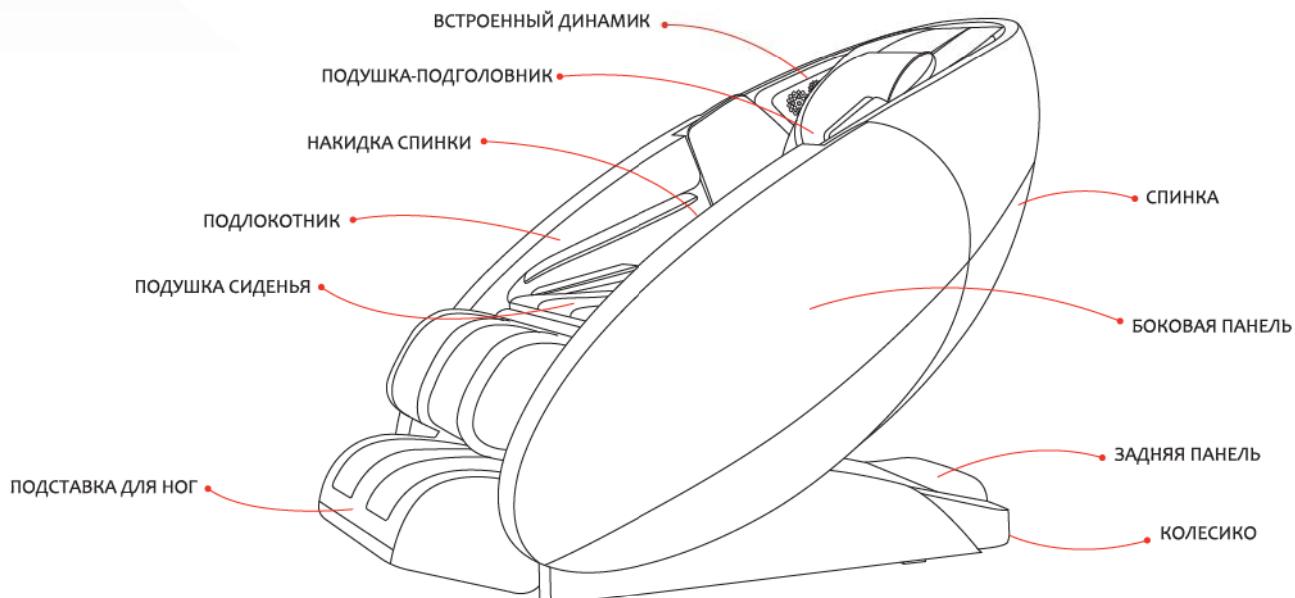


ЗОНЫ МАССАЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

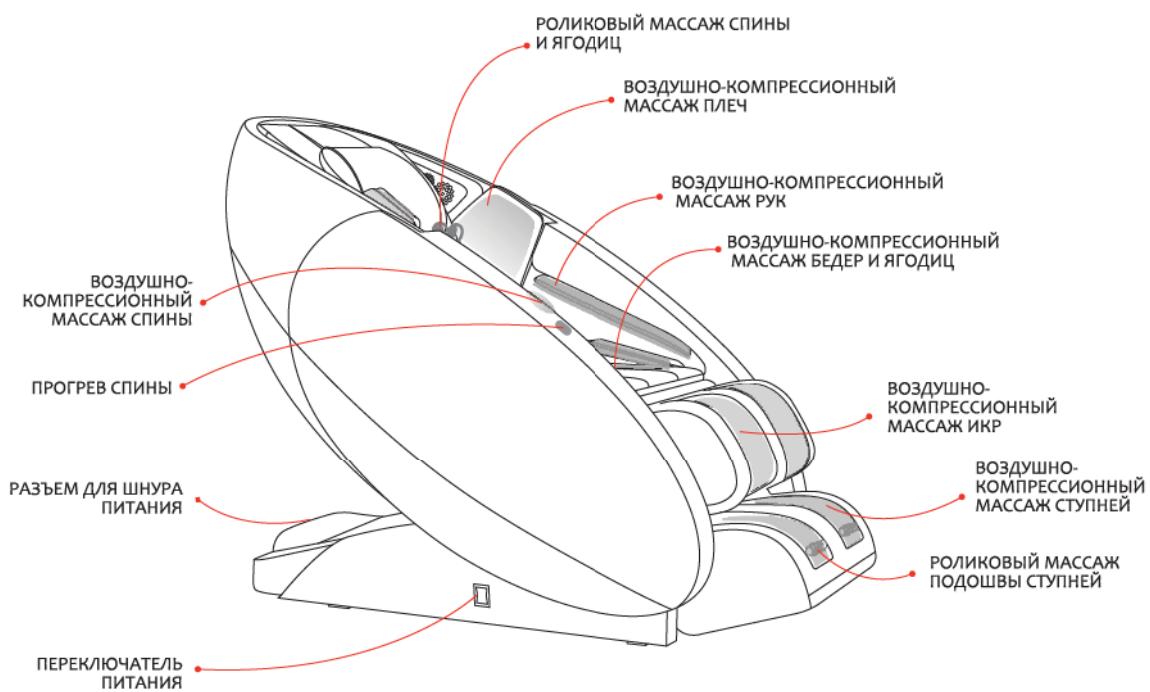

УСТАНОВКА КРЕСЛА

8

- Устанавливайте кресло на ровной поверхности.
- При установке кресла убедитесь, что оно отключено от сети.
- Вследствие того, что массажное кресло отклоняется назад, убедитесь, что сзади кресла имеется как минимум 50 см свободного пространства.
- Так как подставка для ног поднимается и выдвигается вперед, убедитесь, что спереди кресла имеется как минимум 30 см свободного пространства.
- Основание массажного кресла может повредить напольное покрытие. Во избежание повреждений желательно располагать кресло на мягкому покрытию или коврике.
- Во избежание помех не располагайте кресло ближе чем на 1 м от телевизора и других аудио-видео приборов.
- Убедитесь, что расстояние между сетевой розеткой и переключателем питания на кресле не менее 1,5 метра.

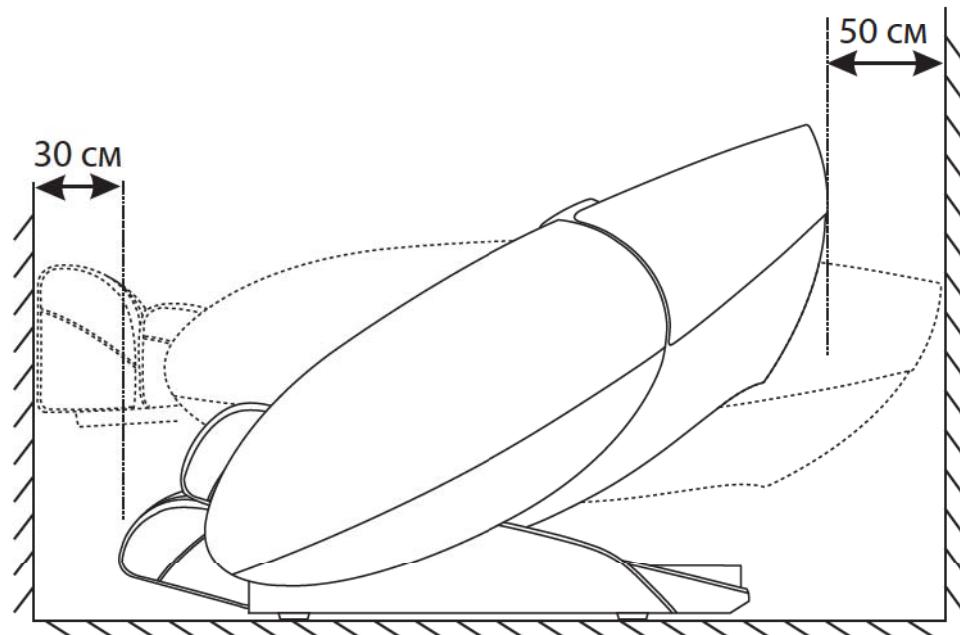

СБОРКА КРЕСЛА


9

1

Извлеките кресло и его составляющие из упаковок. Желательно задействовать для этого несколько человек. Убедитесь в полной комплектации изделия.

2

Подключите провод пульта управления к разъему,енному на внутренней стороне боковой панели. Обратите внимание, чтобы расположение контактов на коннекторе и разъеме совпадали.

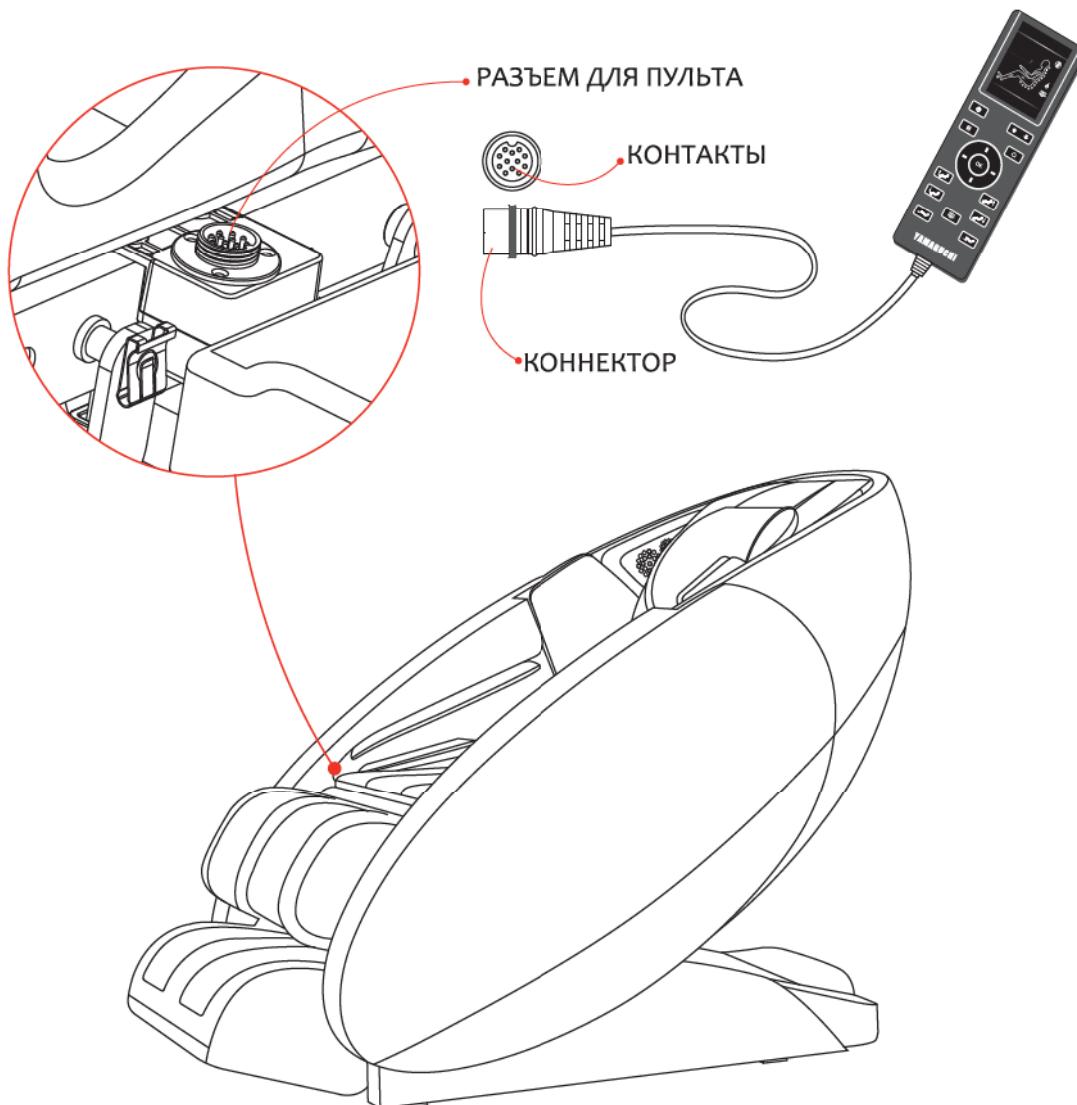


10

3

Подключите шнур питания к соответствующему разъему, расположенному на задней панели кресла (см. рис. ниже).

4


Включите кресло в сеть, нажмите на переключатель питания. С помощью пульта управления приведите спинку кресла в вертикальное положение.

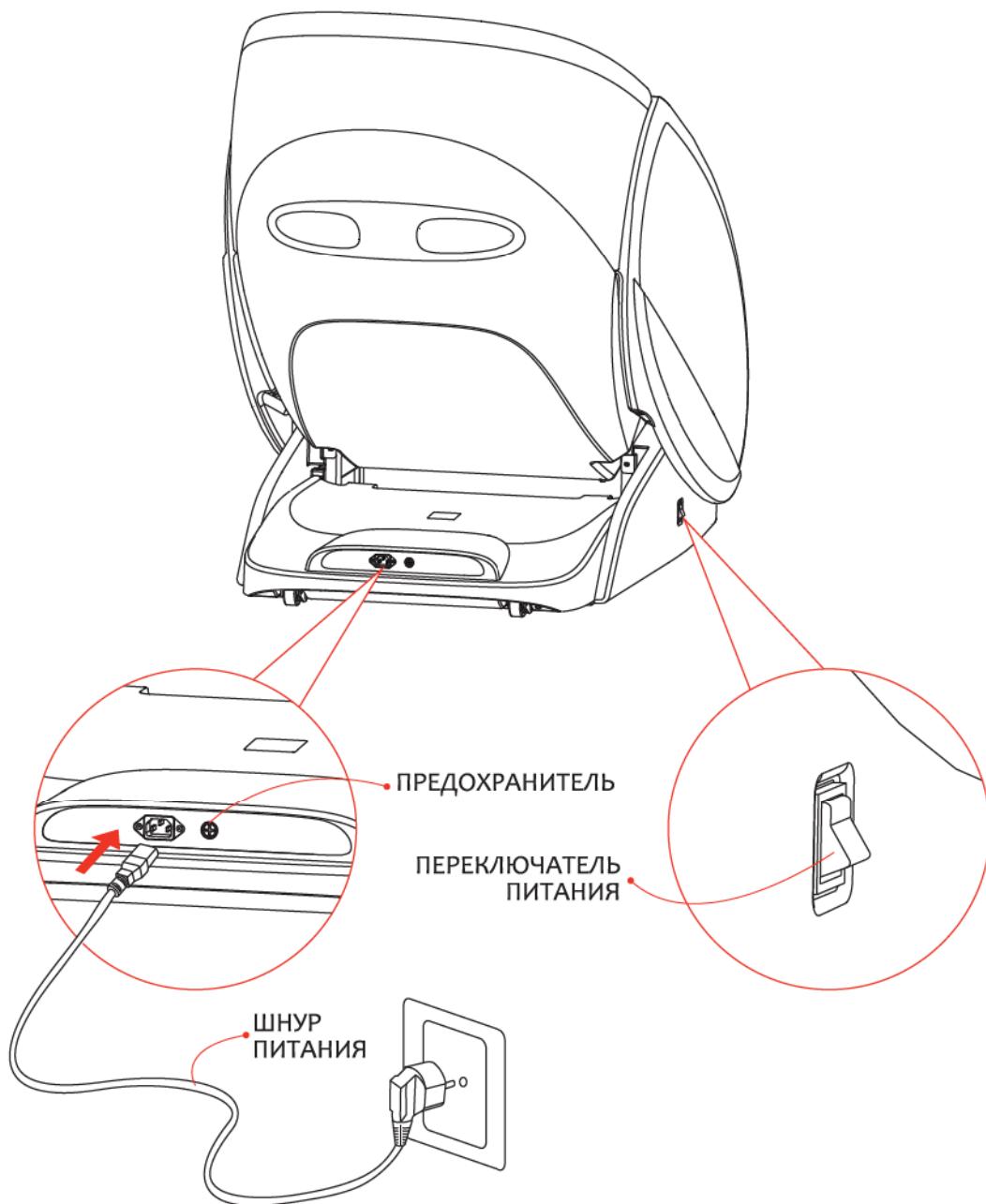

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

11

- Перед тем, как двигать кресло, верните подставку для ног и спинку кресла в исходное положение.
- Отключите кресло от сети.
- Перемещать кресло желательно вдвоем.
- Один человек поднимает переднюю часть кресла (где расположена подставка для ног).
- Второй человек берется за спинку кресла (где расположены ручки) и аккуратно толкает кресло вперед.
- Никогда не перемещайте кресло с сидящим в нем человеком.
- Желательно подстелить половик под кресло, так как оно может поцарапать пол во время перемещения.

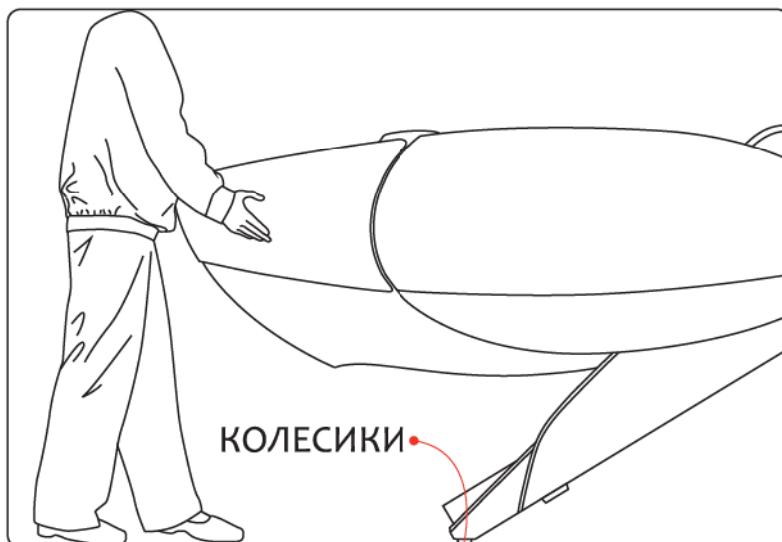

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

12



ON/OFF КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Нажмите данную кнопку для включения кресла, при этом загорится дисплей пульта управления. Повторно нажмите данную кнопку для отключения работы устройства.



MENU КНОПКА ПЕРЕХОДА К ОСНОВНОМУ МЕНЮ РЕЖИМОВ

Нажмите данную кнопку для перехода к меню режимов. С помощью кнопок джойстика Вы можете выбрать автоматический режим массажа, ручной режим, воздушно-компрессионный режим массажа, прогрев, роликовый массаж стоп или установить длительность массажа.



UP/DOWN ADJUST РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РОЛИКОВ ПО ВЫСОТЕ

В режиме ручного массажа, при выборе массажа в определенной точке спины нажмайте и удерживайте данные кнопки для регулировки положения роликов по высоте.



AUTO КНОПКА ВЫБОРА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Нажмите на данную кнопку для выбора одного из автоматических режимов массажа:

ОБЩИЙ, РАСТЯЖКА, РЕЛАКС, СМАРТ, СПИНА, ПОЯСНИЦА, ДЕМО



ДЖОЙСТИК

Для перемещения вправо, влево, вверх или вниз по меню нажмайте на кнопки джойстика на пульте управления, затем нажмите на кнопку OK для подтверждения выбора.



КНОПКА ПОЛОЖЕНИЯ НУЛЕВОЙ ГРАВИТАЦИИ ZERO

Нажмите данную кнопку для включения/выключения режима системы нулевой гравитации.



FEET ADJUST КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

Для поднятия вверх подставки для ног нажмите и удерживайте кнопку.

Для того чтобы опустить вниз подставку для ног нажмите и удерживайте кнопку.



BACK ADJUST КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ

Для поднятия вверх спинки кресла нажмите и удерживайте кнопку.

Для того чтобы опустить вниз спинку кресла нажмите и удерживайте кнопку. Подставка для ног будет подниматься и опускаться пропорционально углу изменения спинки кресла.



FEET EXTEND/RETRACT КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ДЛИНЫ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

Для увеличения длины подставки для ног нажмите и удерживайте данную кнопку.

Для уменьшения длины подставки для ног нажмите и удерживайте данную кнопку.

ВНИМАНИЕ! При выдвижении подставки для ног вперед, убедитесь, что она поднята на определенный угол и перед ней есть достаточно места.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ


14

I. Автоматический режим

Начало работы

Когда кресло включено в сеть, и переключатель питания (стр.10) переведен в положение ВКЛ, нажмите на кнопку **ON/OFF** на пульте управления.



По умолчанию, меню пульта управления отображается на английском языке. Перед первым использованием Вам необходимо в меню настроек выбрать русский язык. Для этого с помощью кнопки **ВНИЗ** выберите **SETTING**, нажмите **OK**. Затем выберите язык **LANGUAGE - русский**.

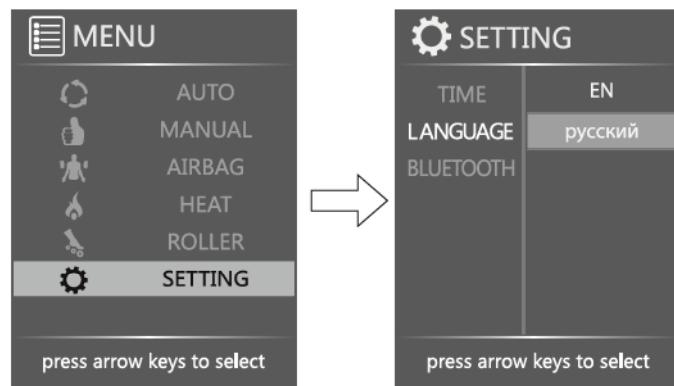



Далее Вы можете выбрать один из 24 автоматических режимов или режим **ДЕМО**. Для этого в отобразившемся на экране меню выберите опцию **АВТО** нажатием кнопки **OK** на джойстике. Используйте кнопки джойстика **ВВЕРХ ВНИЗ** и **OK** на пульте управления для перехода и выбора автоматического режима.





Для возврата к меню нажмите на кнопку **MENU**.

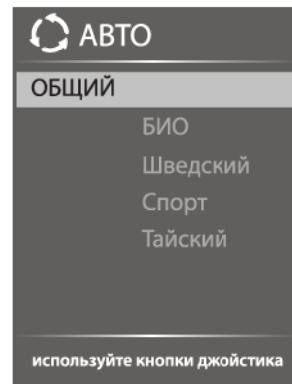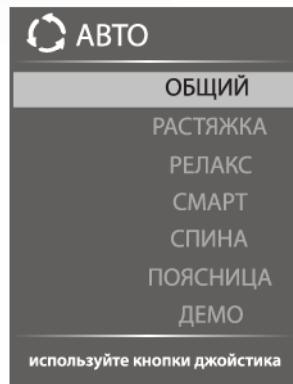

ОБЩИЙ (БИО, Шведский, Спорт, Тайский). Данные режимы массажа воздействуют на весь организм в целом. Уникальные режимы разработаны таким образом, чтобы максимально эффективно охватывать все зоны тела в процессе массажа.



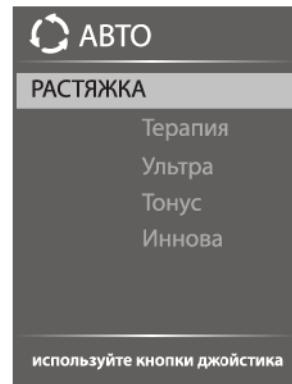
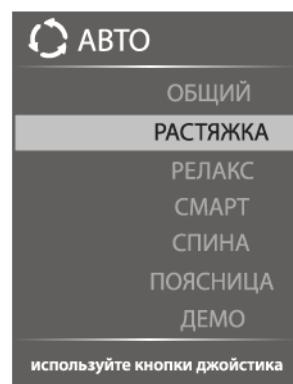


РАСТЯЖКА (Терапия, Ультра, Тонус, Иннова). Основной задачей данных режимов массажа является деликатное растяжение мышц и связок спины, что особенно важно для тех, кто занимается сидячей работой и мало двигается.

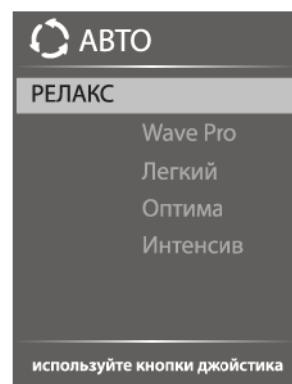
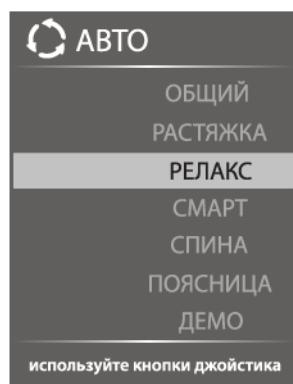


РЕЛАКС (Wave Pro, Легкий, Оптима, Интенсив). Данные режимы массажа помогают полностью снять напряжение всех мышц благодаря особенно чувствительным точечным приемам и тщательной проработке тела, а также благодаря уникальной функции качания кресла - имитации движения по волнам.

Режим **Wave Pro** - это эксклюзивный режим качания кресла без массажных техник для максимального расслабления.

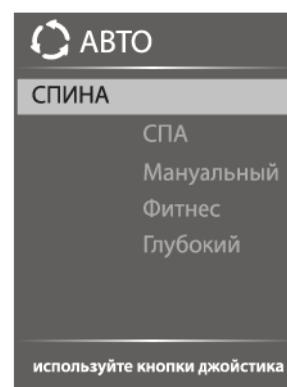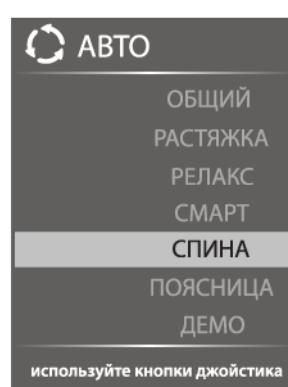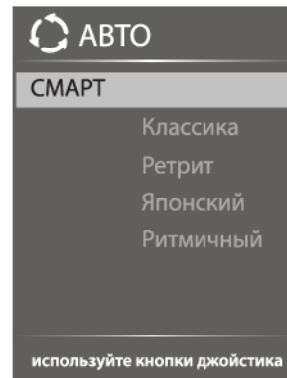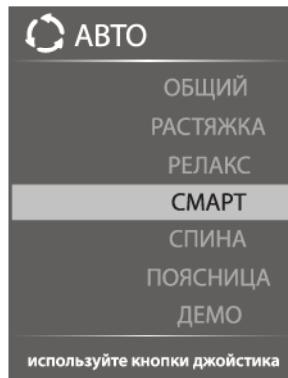


СМАРТ (Классика, Ретрит, Японский, Ритмичный). Набор определенных массажных техник в данных режимах позволяет быстро восстановить мышечный тонус и нормализовать работу всего организма. Во время данных режимов каждая мышца тела глубоко прорабатывается массажными роликами и воздушными подушками, что позволяет максимально эффективно убрать болевой синдром и улучшить кровообращение.

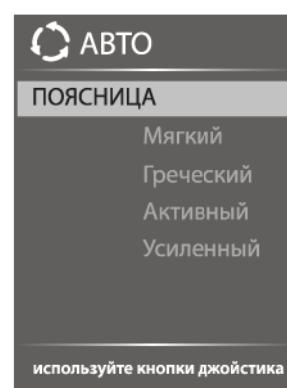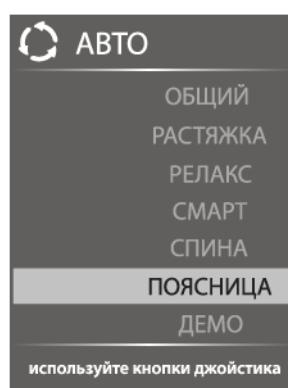

СПИНА (СПА, Мануальный, Фитнес, Глубокий). Данные режимы массажа оказывают интенсивное воздействие на верхнюю часть спины, уделяя особое внимание околоподключичной и плечевой зонам.

ПОЯСНИЦА (Мягкий, Греческий, Активный, Усиленный). Во время данных режимов массажа максимальное воздействие осуществляется на поясницу, бедра и ягодицы.

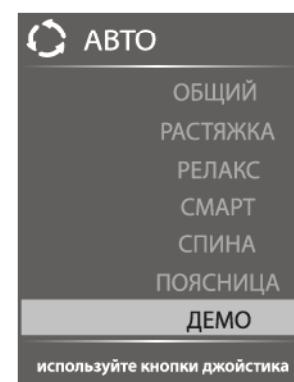


ДЕМО. При выборе данного режима происходит демонстрация всех функций и техник массажного кресла. Длительность режима - 5 минут.

II. Ручной режим

17

Нажмите на кнопку **MENU** на пульте управления, далее в отобразившемся на экране меню выберите опцию **РУЧНЫЕ** и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Для перемещения по опциям меню используйте кнопки джойстика на пульте управления. Далее в меню ручных режимов выберите необходимую опцию: **РЕЖИМ**, **ЗОНА**, **ШИРИНА** или **СКОРОСТЬ**.

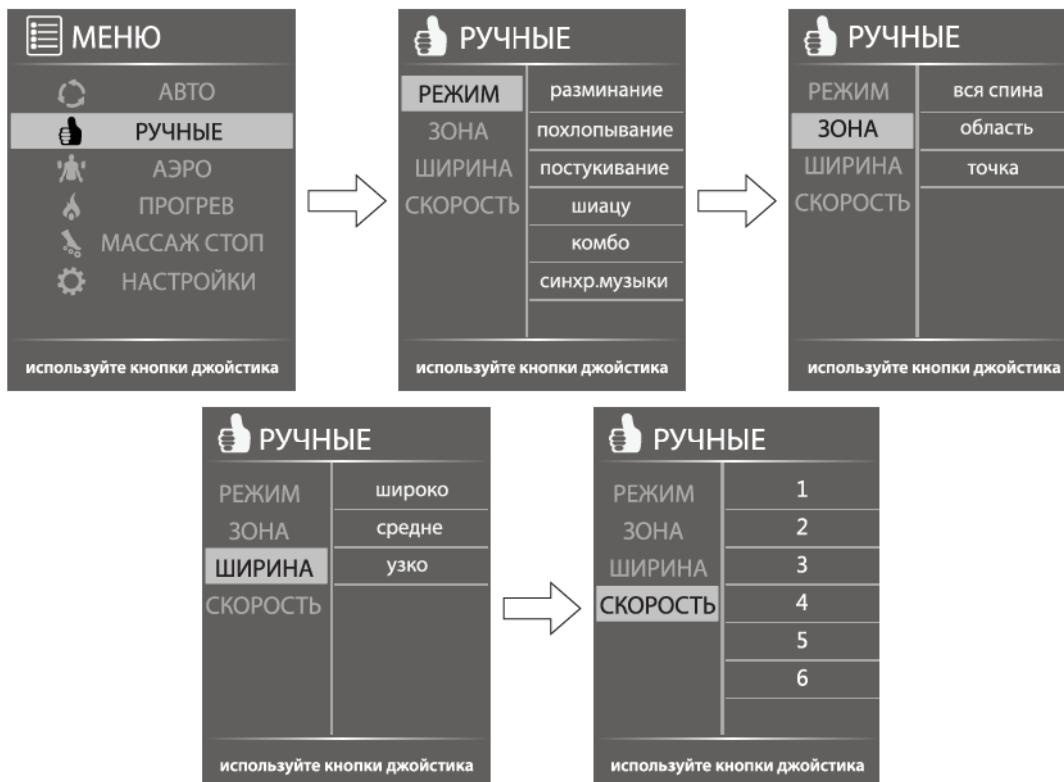

РЕЖИМ. Вы можете выбрать вид массажного воздействия:

- разминание;
- похлопывание;
- постукивание;
- шиацу;
- комбо (комбинация постукивания и разминания);
- синхр.музыки (синхронизация массажа с музыкой).

ЗОНА. Вы можете выбрать зону массажного воздействия:

- вся спина;
- область;
- точка.

ШИРИНА. Во время данного режима Вы можете выбрать ширину расположения роликов:

- широко;
- средне;
- узко.

Данная функция доступна только для таких видов массажного воздействия как **похлопывание, постукивание, шиацу**.

СКОРОСТЬ. Во время данного режима Вы можете выбрать уровень скорости движения роликов от 1 до 6.

Данная функция недоступна для массажа **шиацу**.

III. Воздушно-компрессионный режим

Нажмите на кнопку **MENU** на пульте управления, далее в отобразившемся на экране меню выберите опцию **АЭРО**. Для перемещения по опциям меню используйте кнопки джойстика на пульте управления. В появившемся меню аэромассажа выберите необходимую опцию: **ЗОНА** или **ИНТЕНСИВНОСТЬ**.



ЗОНА. При выборе данной опции Вы можете выбрать часть тела для воздушно-компрессионного массажного воздействия:


- все тело;
- руки/плечи;
- спина/поясница;
- ноги/стопы;
- ягодицы.

ИНТЕНСИВНОСТЬ. При выборе данной опции Вы можете установить уровень интенсивности воздушно-компрессионного массажного воздействия от 1 до 5 или выключить воздушно-компрессионный массаж (**выкл**).

IV. Режим прогрева

19

Нажмите на кнопку **MENU** на пульте управления, далее в отобразившемся на экране меню с помощью кнопок джойстика выберите опцию **ПРОГРЕВ**. В появившемся меню режима прогрева выберите необходимую опцию: **вкл** или **выкл**.

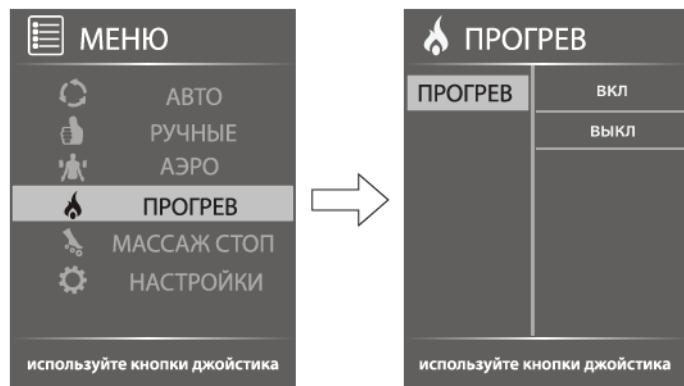


V. Режим роликового массажа стоп

Нажмите на кнопку **MENU** на пульте управления, далее в отобразившемся меню с помощью кнопок джойстика выберите опцию **МАССАЖ СТОП**. В появившемся меню Вы можете выбрать уровень скорости движения роликов от 1 до 3, либо отключить роликовый массаж стоп **выкл**.



VI. Настройки

Нажмите на кнопку **MENU** на пульте управления, далее в отобразившемся меню с помощью кнопок джойстика выберите опцию **НАСТРОЙКИ**. В появившемся меню выберите опцию: **ВРЕМЯ, ЯЗЫК** или **BLUETOOTH**.

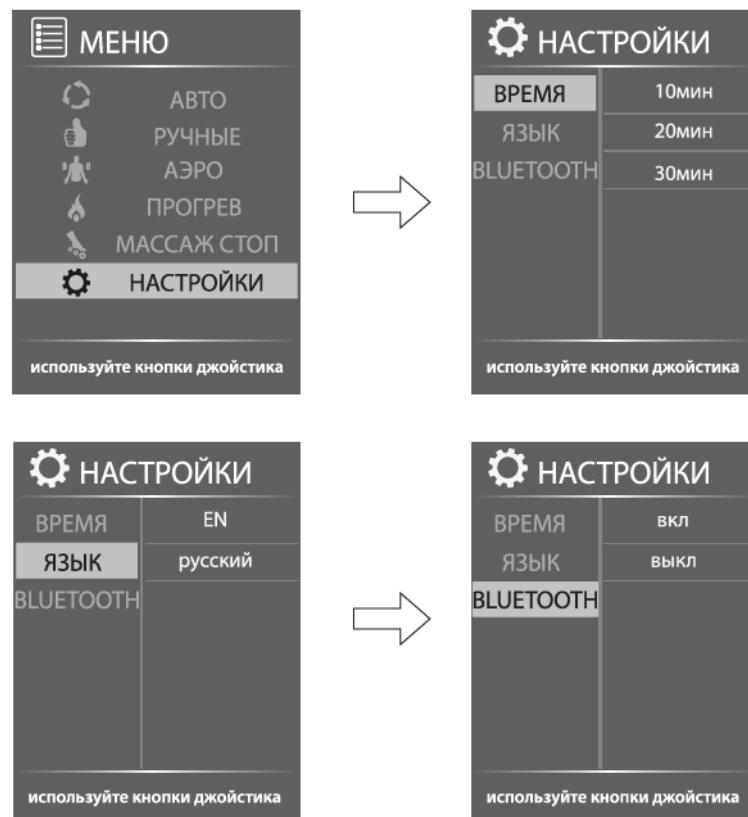

ВРЕМЯ. При выборе данной опции Вы можете установить длительность массажа:
 - 10 минут;
 - 20 минут;
 - 30 минут.

ЯЗЫК. С помощью кнопок джойстика Вы можете выбрать один из предустановленных языков отображения меню.

BLUETOOTH. Включите или выключите функцию Bluetooth.




Исходная страница
ручных режимов



Исходная страница
автоматических режимов

- При отображении на экране пульта управления исходной страницы ручного или автоматического режима, для немедленного перехода к меню, нажмите на кнопку **МЕНЮ** на пульте управления.
- При отображении на экране пульта управления исходной страницы ручного или автоматического режима нажимайте на кнопки джойстика **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** для увеличения или уменьшения уровня интенсивности воздушной компрессии АЭРО.
- При отображении на экране пульта управления исходной страницы ручного режима, нажимайте на кнопки джойстика **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для увеличения или уменьшения уровня скорости движения роликов СКОРОСТЬ.
- Нажимайте на кнопку **AUTO** на пульте управления для непосредственного выбора одного из автоматических режимов массажа.
- Перед началом автоматического режима массажа устройство выполнит сканирование роста пользователя. На экране отобразится следующее окно:

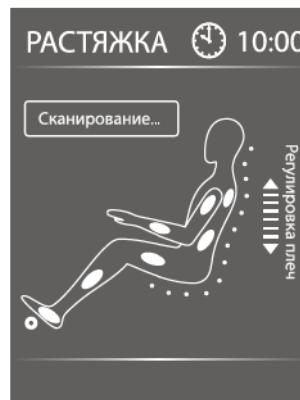

Во время отображения надписи «Регулировка плеч» Вы можете отрегулировать положение роликов в области плеч. Для этого нажмите и удержите кнопки **UP/DOWN ADJUST** на пульте управления.

РЕЖИМ BLUETOOTH

22

Подключение к устройствам на базе Android

Зайдите на Google Play и скачайте приложение управления креслом YAMAGUCHI. Установите его на портативное устройство (планшет или телефон) с операционной системой Android.

Убедитесь, что приложение установлено корректно.

Зайдите в раздел Bluetooth на Вашем планшете или телефоне, включите его и найдите в сопряжённых устройствах название YAMAGUCHI ORION, далее подключитесь к нему.

Запустите приложение нажав на соответствующую иконку YAMAGUCHI. На экране телефона отобразится окно основного меню.

Теперь Вы можете управлять креслом с Вашего телефона или планшета:

- выбрать один из 6 основных автоматических режимов массажа;
- выбрать вид массажного воздействия в ручных программах массажа;
- отрегулировать угол наклона спинки кресла;
- отрегулировать угол подъема подставки для ног;
- выбрать положение невесомости ZERO Gravity;
- отключить или установить интенсивность массажа стоп;
- выбрать интенсивность воздушной компрессии или роликового воздействия;
- выбрать функцию синхронизации массажа с музыкой;
- установить длительность массажа и т.д.

Внимание! Перед сопряжением Вашего устройства с креслом убедитесь, что кресло подключено к сети, в противном случае Ваш телефон или планшет может не обнаружить кресло среди Bluetooth-устройств.

Внимание! Убедитесь, что в настройках кресла установлена функция Bluetooth - «вкл.» (стр.20).

Подключение к устройствам на базе iOS

Зайдите в Apple Store и скачайте приложение YAMAGUCHI.

Убедитесь, что приложение установлено корректно.

Зайдите в раздел Bluetooth на Вашем планшете или телефоне, включите его и найдите в сопряжённых устройствах название YAMAGUCHI ORION, далее подключитесь к нему.

Запустите приложение нажав на соответствующую иконку YAMAGUCHI. На экране телефона отобразится окно основного меню.

Теперь Вы можете управлять креслом с Вашего телефона или планшета:

- выбрать один из 6 основных автоматических режимов массажа;
- выбрать вид массажного воздействия в ручных программах массажа;

- отрегулировать угол наклона спинки кресла;
- отрегулировать угол подъема подставки для ног;
- выбрать положение невесомости ZERO Gravity;
- отключить или установить интенсивность массажа стоп;
- выбрать интенсивность воздушной компрессии или роликового воздействия;
- выбрать функцию синхронизации массажа с музыкой;
- установить длительность массажа и т.д.

Внимание! Убедитесь, что в настройках кресла установлена функция Bluetooth - «вкл.» (стр.20)

Прослушивание музыки

Зайдите в раздел Bluetooth на Вашем планшете или телефоне, включите его и найдите в сопряжённых устройствах название YAMAGUCHI ORION, далее подключитесь к нему.

После удачного подключения Вы можете воспроизводить мелодии, записанные на Вашем телефоне или планшете, через встроенные в кресло динамики.

Внимание! Убедитесь, что в настройках кресла установлена функция Bluetooth - «вкл.» (стр.20)

УХОД И ХРАНЕНИЕ

24

- Перед тем, как производить чистку или обслуживание устройства, отключите его от сети.
- Не касайтесь шнура или вилки мокрыми руками.
- Не тяните за шнур питания, чтобы выключить устройство из розетки.
- При очистке поверхностей из кожзама, протрите их мягкой тканью, пропитанной нейтральным моющим средством. Затем удалите средство влажной тканью и дайте поверхностям высохнуть. Не используйте слишком большое количество моющего средства, оно может повредить структуру материала.
- Сухой мягкой тканью протрите все остальные поверхности кресла.

ВНИМАНИЕ! Не используйте едкие чистящие или моющие средства для очистки кресла, чтобы избежать повреждения или обесцвечивания материала изделия.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений избегайте намокания изделия.

- Храните кресло в сухом и прохладном месте вдали от попадания прямых солнечных лучей или высокой температуры, так как это может испортить материал обивки.
- Накройте кресло чистой тканью, если не собираетесь использовать его в течение долгого периода времени.
- Избегайте соприкосновения устройства с острыми или режущими предметами, которые могут повредить материал обивки кресла.
- Не проглаживайте обивку кресла горячим утюгом!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

25

Описание	Многофункциональное массажное кресло
Модель	Yamaguchi Orion
Номинальное напряжение	220-240 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Мощность	240 Вт

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

26

Проблема	Возможная причина	Решение
Громкий звук во время использования кресла	Звук может быть вызван трением массажных роликов об обивку кресла	Это нормальное явление и не является неисправностью кресла
Устройство не работает	Кресло не включено в сеть	Включите устройство в сеть
	Не нажата кнопка питания	Нажмите кнопку питания
	Перегорел предохранитель	Обратитесь в сервисный центр для замены предохранителя
Музыка не воспроизводится	Установлен минимальный уровень громкости	Установите уровень громкости на большее значение
	В настройках кресла не включена функция Bluetooth	Включите функцию Bluetooth (стр. 20)
Невозможно отрегулировать угол наклона спинки кресла или подставки для ног	Кресло не включено в сеть	Включите устройство в сеть
	Большая нагрузка на спинку кресла или подставку для ног	Снизьте нагрузку или давление на спинку кресла и подставку для ног





YAMAGUCHI®

by YAMAGUCHI ELECTRONICS SOLUTIONS, CO. LTD.